



## DAS PLUS AN LEISTUNG FÜR ALLE OBERFLÄCHEN

### Incidin™ Plus

#### FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL MIT GLUCO- PROTAMIN™, ALDEHYDFREI UND OHNE QAV

Breites Wirkspektrum gegen Bakterien (inkl. MRSA), behüllte Viren und Hefen. Hohe Desinfektionsleistung auf allen abwaschbaren Flächen, selbst in Risikobereichen.

- Einzigartiger Wirkstoff Glucoprotamin™
- Breites Wirkspektrum
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit



# Incidin™ Plus

Flächendesinfektionsmittel mit Glucoprotamin™, aldehydfrei und ohne QAV

UNSERE LEISTUNG	IHR NUTZEN
Einziger Wirkstoff Glucoprotamin™	Ausgewählte Bestandteile und der biologisch abbaubare Wirkstoff (Glucoprotamin™) sorgen für eine nachhaltige Formulierung.
Hervorragende Reinigungsleistung	Zusatz von Reinigungsadditiven nicht notwendig
RKI-gelistet	Einsetzbar auch im Seuchenfall

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION %	ml/L	EINWIRKZEIT Min.
<b>Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015, hohe Belastung</b>			
Bakterizid, levurozid	0,5/1,0/2	5/10/20	60/30/15
<b>Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie</b>			
<b>Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004*</b>			
Rotavirus*	0,5	5	30
Adenovirus*	2	20	120
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	3	30	60
<b>EURO-Normen 4-Felder-Test (geringe und hohe Belastung)</b>			
EN 16615 (bakterizid, levurozid)	0,5	5	30
<b>EURO-Norm</b>			
EN 14383 (tuberkulozid) (geringe Belastung)	3/0,5	30/5	30/60
EN 14383 (tuberkulozid) (hohe Belastung)	2/0,75	20/7,5	30/60
EN 14383 (mykobakterizid) (geringe & hohe Belastung)	3/0,75	30/7,5	30/60
<b>RKI-Liste Flächendesinfektion</b>			
<b>Gem. § 18 IfSG (Desinfektion im Seuchenfall)</b>			
Wirkungsbereich A	8	80	360

\* DVV 2015 (Susp. Test)

## BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Incidin™ Plus Dosierbeutel	400 x 20 ml	30 125 20 PZN 006 153 97
Incidin™ Plus Dosierflasche	3 x 2 L	30 115 10 PZN 073 281 81
Incidin™ Plus Kanister	6 L	30 115 20 PZN 069 525 75

### EUROPEAN HEADQUARTERS: ECOLAB EUROPE GMBH

Richtstrasse 7  
8304 Wallisellen  
Switzerland  
+41 (0) 44-877-2001

[www.ecolab.eu](http://www.ecolab.eu)



**ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH**  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
+49 (0) 2173-599-1900

[www.ecolabhealthcare.de](http://www.ecolabhealthcare.de)

**ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH**  
Kägenstrasse 10  
4153 Reinach  
+41 (0) 61-466-94-66

[www.ecolabhealthcare.ch](http://www.ecolabhealthcare.ch)



[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

## ANWENDUNGSBEREICH



Flüssiges Flächendesinfektionsmittelkonzentrat für Medizinprodukte



Flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat zur Desinfektion von Flächen aller Art.

Ⓓ BIOZID N-11720  
ⒸH CHZN 1705

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Herstellen der Desinfektionslösung durch Verdünnen mit Wasser (max. 30°C).

Gebrauchslösung in gewünschter Konzentration ansetzen. Zu behandelnde Flächen feucht abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten. Bei der Produktanwendung stets geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

Amin- bzw. aminderivathaltige Desinfektionsmittel und aldehydhaltige Desinfektionsmittel sind nicht im Wechsel anwendbar. Bei Umstellung ist eine gründliche Zwischenreinigung notwendig.

## ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g ist als Wirkstoff enthalten:  
26 g Glucoprotamin™

## GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

## LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern.

Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

**BIOZIDE UND MEDIZINPRODUKTE  
VORSICHTIG VERWENDEN. VOR  
GEBRAUCH STETS ETIKETT UND  
PRODUKTINFORMATIONEN LESEN.  
NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN  
GEBRAUCH.**

